

BRUKSANVISNING



FRÄTANDE

Läs noga bruksanvisningen innan användning. Spara bruksanvisningen. Du kan behöva läsa den igen. Endast för utvärtes bruk. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

1. Vad VårtFri är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder VårtFri
3. Hur du använder VårtFri
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring och övriga upplysningar

Scanna koden för att lära mer om hur VårtFri används



VårtFri™

1. VAD VÅRTFRI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

VårtFri är ett effektivt vårtborttagningsmedel för behandling av vårtor på händer, fötter, armbågar och knän på både barn och vuxna. Den unika sammansättningen i VårtFri hjälper kroppen att torka ut och stöta bort vårtor. VårtFri absorberas direkt in i vårtan och lämnar inga spår på huden. Du kan genast efter applicering t.ex. ta på strumpor eller bada.

VårtFri är en svensk patenterad och CE märkt medicinteknisk produkt som är biologiskt nedbrytbar. VårtFri är baktericid och vid korrekt användning ger lösningen inga ärr eller infektioner. En flaska VårtFri räcker till ca 30 behandlingar för 1-5 vårtor.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER VÅRTFRI

2.1 ANVÄND INTE VÅRTFRI

- Använd inte på ansiktsvårtor, könsvårtor, mollusker, leverfläckar, liktornar, hudförhårdnader eller andra hudförändringar.
- Använd inte plåster med VårtFri. Plåster kan orsaka hudskador, se 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
- Använd inte om behandlad vårta blir öm, sårig eller blöder eller om huden blir irriterad. Gör uppehåll i behandlingen tills huden är återställd.
- Använd inte VårtFri i kombination med andra vårtborttagningsmetoder.
- Använd inte VårtFri om du är överkänslig mot något innehållsämne, se 5. FÖRVARING OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR.

2.2 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET



VårtFri är frätande med irriterande och stark lukt. Får inte inandas. Endast för utvärtes bruk. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte för mycket! För mycket lösning eller felaktig användning kan ge upphov till smärta och hudskador, se 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR.

- Om du använder för mycket eller av misstag spiller lösning på huden, skölj genast rikligt med vatten för att minska hudskada.
- Om du får stänk i ögat, skölj genast upprepade gånger med ljummet vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare eller ring 112.

Var särskilt försiktig vid behandling på tunn hud, t.ex. på barn och oavsida händer, se 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING och 3.2 BEHANDLING AV BARN.

3. HUR DU ANVÄNDER VÅRTFRI

3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING

Det behövs ytterst lite lösning för att VårtFri ska vara verksam. Läs instruktionen nedan noga eftersom lösningen är frätande. Använd alltid medföljande tops för applicering. Var varsam med flaskan för att undvika spillolycka vid applicering.

Håll inte flaskan i handen under behandlingen. Ställ flaskan på diskbänk eller liknande. Spill kan orsaka hudskador eller skador på målade ytor, textilier mm. Skruva på korken ordentligt efter användning. Använda tops spolat med vatten innan de kastas.



1 Doppa topsen i lösningen, stryk noggrant av mot flaskkanten. Topsen ska endast vara fuktad.

2 Tryck lätt med topsen på vårtan i en sekund, upprepa en till två gånger. Var noga med att inte vidröra omgivande hud.

För lyckat resultat, behandla **regelbundet** en gång i veckan tills vårtan är borta, annars stannar processen upp. Om du behandlar oregelbundet tar processen längre tid.

Vid behandling av **gamla och/eller stora vårtor** hos vuxna kan man efter 4-5 veckor börja behandla var femte dag om huden inte är irriterad. **Använd inte för mycket.**

Vid behandling av vårtor på **tunn hud** kan det ibland räcka med mindre mängd lösning. Tryck alltid topsen lätt på en bit mjukt papper innan behandling. Behandla mer sällan, såsom varannan eller var tredje vecka.

Vid behandling av **många vårtor**, börja med att behandla ett par stycken i ett par veckor. Om huden är opåverkad kan du börja behandla ytterligare vårtor. Flera små vårtor kan behandlas på samma gång utan att doppa topsen på nytt i VårtFri (ett dopp räcker till 1-5 vårtor, ibland fler beroende på storlek). Börja med de största vårtorna.

Håll vårtan mjuk mellan behandlingarna genom att smörja in med vanlig hudlotion eller olja. Då kan vårtan lättare komma ut.

Vårtan kan vitna och växa ut inledningsvis, innan den börjar torka ut. När vårtan utvidgas kan det ömma i den omgivande huden. Se till att vårtan inte täcks av hud, se nedan.

Skulle vårtan kännas öm, eller det dunkar i den, kan det bero på att man haft på för mycket lösning, se 2.1 ANVÄND INTE VÅRTFRI eller att vårtan inte kan komma ut genom huden som täcker vårtan. Om huden ligger som ett lock över vårtan, måste man göra en öppning i huden t.ex. med en pincett för att släppa ut vårtan. Har du en gammal eller hård vårta, kan du innan behandlingen blötlägga området med vårtan i varmt vatten tills huden är mjuk. Peta eller rugga upp huden på vårtan t.ex. med pincett. Vid tjock hud på inåtgående fotvårtor, avlägsna försiktigt bort hård hud. På nagelbandsvårtor kan det behöva göras ett litet hål i yttersta huden så att medlet kan komma in i

vårtan. Fila inte på vårtorna. Vårtorna kan bli ömma och det bildas ny hård yta på vårtan.

Efter några behandlingar syns oftast svarta prickar i vårtan. Det är små blodkärl som förser vårtan med blod. Det är tecken på att vårtan är på väg att försvinna och behandling skall fortgå tills svarta prickarna och vårtan är helt borta. Ibland kan de svarta prickarna blöda lite då du skrapat på vårtan. Vänta några minuter med att applicera VårtFri tills det slutat blöda, annars kan det svida. Om det svider, ha på kallt vatten för att lindra obehaget.

3.2 BEHANDLING AV BARN

Behandling av barn skall alltid utföras av en vuxen. Följ anvisningarna för applicering i 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING noga då lösningen är frätande. Små barn har mjuk och tunn hud. Använd ytterst lite VårtFri-lösning på barnvårtor. Ett dopp i lösningen räcker till fler vårtor. Vårtorna är oftast borta efter 2-3 behandlingar.

Barn **under 4 år** kan behandlas med VårtFri men säkerställ alltid att det verkligen är en vårta och inte någon annan typ av hudförändring. Rådgör med din läkare eller BVC innan behandling. För barn under 4 år är det extra viktigt att minska mängden lösning. Behandla mer sällan, såsom varannan eller var tredje vecka.

- Tryck topsen lätt på en bit mjukt papper innan du lätt trycker topsen på vårtan i en sekund. Upprepa en gång.
- Var noga med att inte vidröra omgivande hud.
- Om barnet kommer åt att slicka på vårtan kan man tvätta av det behandlade området eftersom lösningen tränger in direkt.
- Om det skulle svida eller sticka till vid behandling, skölj vårtan med kallt vatten och sätt inte på mer medel. Det har redan hunnit gå ner i vårtan.

3.3 BEHANDLING AV PERSONER MED DIABETES

Diabetiker ska enbart använda VårtFri på vårtor på frisk hud (oskadad och av sjukdom opåverkad) och med extra försiktighet. Vid besvär, rådgör alltid med din läkare/sköterska eller fotvårdsspecialist.

3.4 HUR LÄNGE SKA VÅRTFRI ANVÄNDAS

VårtFri är mycket effektivt – de flesta vårtor går bort och kommer inte tillbaka. Ibland kan dock vårtor som redan finns under huden, komma fram då du börjar behandla.

Vårtor kan se olika ut och det kan ta olika lång tid att ta bort dem. Vanligast är 5 till 15 behandlingar, men det kan också ta kortare eller längre tid. Faktorer som kan påverka hur lång tid du måste behandla innan vårtorna försvinner är din ålder, vilken sorts vårta det är, ditt immunförsvar, var vårtan sitter och hur länge du haft den. Nedsatt immunförsvar och medicinering med t.ex. kortison kan göra att det tar längre tid att bli av med vårtorna. Nya vårtor är oftast enklare att ta bort än gamla vårtor. Barnvårtor är oftast lättare att ta bort än vuxenvårtor. För inåtgående fotvårtor och nagelbandsvårtor som suttit många år kan det ta lång tid innan man ser en tydlig effekt av behandlingen och det tar betydligt längre tid innan vårtan är helt borta.

3.5 NÄR SKA JAG SLUTA BEHANDLA MED VÅRTFRI

Sluta med VårtFri när inga svarta prickar syns eller om vårtan har ramlat bort, skrumpnat ihop eller det är en ”grop” där vårtan suttit. Huden blir slät efteråt. Fortsätter man behandla för länge efter att vårtan är borta blir huden lätt rosa och lite vattnig. Sluta då genast att ta på mer VårtFri. Titta efter några veckor där vårtan suttit, finns vårtrester kvar syns en liten prick. Behandla då med VårtFri ett par gånger till.

3.6 VID GRAVIDITET OCH AMNING

Inga kända risker finns vid graviditet och amning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

VårtFri innehåller en stark syra. Om VårtFri används för mycket, felaktigt eller vid spill, kan det orsaka hudskador, se 2.1 ANVÄND INTE VÅRTFRI. Följ anvisningarna för applicering i 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING för att undvika risken för hudskador.

Övergående biverkningar på det behandlade området kan förekomma, som t ex ömhet, stickning, sveda, rodnad, smärta, brännande känsla, blödning från blodkapillärerna. Gör uppehåll i behandlingen tills huden är återställd.

För mycket lösning, felanvändning eller spill kan leda till kraftiga biverkningar som t.ex. blåsor, sår, mörk pigmentering av huden, kemisk brännskada, inflammation, vävnadsdöd (nekros), ärrbildning. Det skadade området ska hållas rent för att det inte ska bli infekterat. Avbryt behandlingen och vid allvarlig hudskada kontakta läkare.

VårtFri har stark lukt som kan vara irriterande för andningsvägar och ögon. Lukta inte på innehållet i flaskan. Biverkningar kan vara t.ex. irritation i luftvägarna och/eller hals, rinnande snuva, rinnande ögon, andnöd.

I enstaka fall har överkänslighetsreaktioner som t ex rodnad, utslag och klåda rapporterats.

5. FÖRVARING OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förvaring: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i rumstemperatur (15-25°C), inte i direkt solljus.

Innehåll: Ofärgad till svagt brun lösning (myrsyra, vatten, glycerol, citronolja).

Förpackning: Glasflaska med barnsäker skruvkork, bruksanvisning och tops för applicering.

Hållbarhet: Se utgångsdatum på flaskan och ytterförpackningen.

Denna bruksanvisning ändrades senast april 2015.

Name	VårtFri
Version	SE
Size	5 ml
Unit	IFU
Date	15-04-22

Abbex AB, Pipers väg 2A, SE-170 73 Solna, Sweden
Tel + 46 8 31 68 00, info@medaotc.se

● HKS 15 N
● HKS 8 N
● Black